

therapik®

VERZACHTING VAN PIJN & JEUK van insectensteken en -beten

Therapik® geeft u tijdelijke verzachting van pijn en jeuk, die veroorzaakt wordt door de pijnlijkste insectensteken van bijen en wespen en de vaakst voorkomende beten van bijv. muggen, door plaatselijk de bloeddorstrooming te vergroten.

GEBRUIKSAANWIJZING

Plaats onmiddellijk na een steek of beet de cirkelvormige opening van de Therapik® op de pijnlijke plek (DRUK ER NIET OP). Activeer de Therapik® door de grote blauwe knop ingedrukt te houden zolang als u de hitte op uw huid kunt verdragen. De gemiddelde tijd is ongeveer 30 seconden. Als de plek pijn blijft doen dan kunt u de Therapik® nogmaals gebruiken totdat de pijn van de steek of beet verzacht is. Wacht 60 seconden na elke toepassing zodat de huidtemperatuur terug kan keren naar normaal.

WAARSCHUWING

Onjuist gebruik van de Therapik® kan leiden tot brandwonden op uw huid.

Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing, Voorzorgsmaatregelen en Contra-indikaties voor u het apparaat gebruikt.

VOORZORGSMATREGELEN

- Voor maximaal effect moet de Therapik® zo spoedig mogelijk gebruikt worden na gebeten of gestoken te zijn.
- Maak het toepassingsgebied droog voor u de Therapik® gebruikt. **Gebruik hem niet in of bij uw ogen en in uw mond.**
- De Therapik® vervangt geen behandelingen voor allergische reacties op insectenbeten of -steken; raadpleeg in het geval van een allergische reactie onmiddellijk de dokter.
- De Therapik® is niet bedoeld om medisch advies of behandeling te vervangen. Raadpleeg een gezondheidsspecialist als de plek erg zeer doet en de pijn aanhoudt.
- Gebruik hem niet over ongevoelige huid en in gebieden met slechte circulatie.

CONTRA-INDIKATIE

Therapik® werkt niet tegen beten en steken van spinnen, schorpioenen en slangen.

ONDERHOUD

De Therapik® werkt op een 9 Volt batterij (het alkaline type wordt aangeraden). De batterij is niet inbegrepen. We raden aan de batterij minstens ééns per jaar te vervangen en vaker indien hij vaak gebruikt wordt.

GARANTIE

Therapik® garandeert dat pijn en jeuken veroorzaakt door insectensteken en -beten verzacht wordt.

SportPlus